

Na zdraví a pohodlí Vašich očí nám záleží...

COMPLETE® EASY RUB™

je víceúčelový roztok na měkké kontaktní čočky, který:

- můžete bez obav použít na všechny typy čoček včetně silikon hydrogelových
- zaručí účinnou desinfekci a čištění pro bezpečné a zdravé používání čoček
- obsahuje složky chránící povrch kontaktních čoček před usazováním bílkovin a tím prodlužuje jejich pohodlné nošení
- je vysoce účinný, ale také velmi jemný, doporučuje se i pro citlivé oči

Nezapomeňte, **COMPLETE® EASY RUB™** Vám poskytuje kompletní péči o Vaše kontaktní čočky:

- čištění
- odstraňování bílkovin a tuků
- oplachování
- desinfekce
- uchovávání
- ochrana proti usazování bílkovin



COMPLETE® EASY RUB™

kvalitní péče pro všechny typy měkkých kontaktních čoček

COMPLETE

Multi-Purpose Solution



Promnutí a opláchnutí kontaktních čoček snižuje množství mikroorganismů a ostatních nečistot na jejich povrchu až o 99%.



Účinné látky obsažené v roztoku **COMPLETE® EASY RUB™** brání růstu a rozmnožování mikroorganismů na kontaktních čočkách nebo v pouzdře na kontaktní čočky.



Roztok **COMPLETE® EASY RUB™** po 6 hodinách desinfekce eliminuje množství mikroorganismů o 99,999%.



lonty obsažené v roztoku

COMPLETE® EASY RUB™ aktivně chrání povrch kontaktních čoček před usazováním bílkovin.

Správná péče o Vaše kontaktní čočky



Před manipulací s kontaktními čočkami si vždy řádně umyjte a osušte ruce.



Nakápněte několik kapek roztoku **COMPLETE® EASY RUB™** na kontaktní čočku.



Bříškem prstu promněte každou stranu čočky po dobu 10 sekund a opláchněte roztokem **COMPLETE® EASY RUB™** po dobu 5 sekund.



Naplňte pouzdro alespoň ze dvou třetin čerstvým roztokem **COMPLETE® EASY RUB™**.



Uložte čočky do pouzdra minimálně na 6 hodin k desinfekci.



Po nasazení kontaktních čoček na oko pouzdro vypláchněte roztokem **COMPLETE® EASY RUB™** a nechte volně na vzduchu vyschnout. Pouzdro na kontaktní čočky vyměňte alespoň každé tři měsíce.



Neoplachujte kontaktní čočky ani pouzdro pod vodou z vodovodu.