

Alcon

Čočky
vlhčí
a svěží

Váš oční specialista Vám může doporučit používání dalších přípravků nebo postupů v péči o čočky na základě vlastností slz a plánovaného systému nošení čoček. Vždy dodržujte všechna doporučení Vašeho očního specialisty.

SPRÁVNÁ PRAXE PÉČE O KONTAKTNÍ ČOČKY

- PŘED POUŽITÍM KOMPLETNĚ ODSTRANĚTE PEČEŤ OKOLO ÚSTÍ KAPACÍ LÁHVE
- PŘED KAŽDOU MANIPULACÍ S KONTAKTNÍMI ČOČKAMI SI VŽDY DŮKLADNĚ UMYJTE A OPLÁCHNĚTE RUCE.
- VŽDY MANIPULUJTE SE STEJNOU ČOČKOU, PRAVOU NEBO LEVOU, ABYSTE PŘEDEŠLI ZAMĚNĚ.
- PO POUŽITÍ POUZDRO VYPRÁZDNĚTE, VYPLÁCHNĚTE ROZTOKEM OPTI-FREE® EXPRESS® A NECHTE VYSCHNOUT NA SUCHÉM VZDUCHU.
- ALCON DOPORUČUJE MĚNIT POUZDRO TAK ČASTO, JAK JE TO MOŽNÉ



www.optifree.cz



Alcon

Dovoz a distribuce:
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.,
Sokolovská 77-79, Praha 8.

TETRONIC je registrovaná značka jiné společnosti.

Čočky
vlhčí
a svěží

OPTI-FREE
Express

Alcon

Čočky
vlhčí
a svěží

OPTI-FREE® EXPRESS®
je víceúčelový dezinfekční roztok
pro měkké kontaktní čočky,
který poskytuje skutečný komfort.
Udrží Vaše čočky vlhké a svěží
až do úplného konce dne.

**MÍT SVĚŽÍ A ROZZÁŘENÝ POHLED JE TAK SNADNÉ
S OPTI-FREE® EXPRESS®**



Každá matrix měkké čočky obsahuje:

- Hydrofilní "vodu přitahující" místa
- Hydrofobní "vodu odpuzující" místa



Molekula Tetric 1304
váže vlhkost jak na hydrofilní,
tak i na hydrofobní
místa na povrchu čočky.



Udržováním vlhkosti,
zůstávají Vaše čočky svěží
a pohodlné a vy je ani
nemusíte cítit.

UPOZORNĚNÍ

Po každém použití láhev dobře uzavřete.
Uchovávejte při pokojové teplotě. Nevystavujte extrémním teplotám.
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti,
která je vyznačena na obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**OPTI-FREE®
Express**

**VYCHUTNEJTE SI SKUTEČNĚ POKODLÍ S ČOČKAMI
NA KONCI DNE**

Řekněte sbohem nepohodlí zapříčiněnému Vašimi čočkami.
Teď s OPTI-FREE® EXPRESS® můžete zapomenout na pocit
sucha, svědění a pocit únavy Vašich očí a radovat se
ze skutečného pohodlí!

Protože OPTI-FREE® EXPRESS® obsahuje unikátní látku
TETRONIC 1304, která udržuje vlhkost na povrchu čočky,
což znamená trvalý komfort až do konce dne.
Toto je způsob, jak zůstanou Vaše čočky
svěží a pohodlně snášené po celý den.
A dokonce je ani nemusíte cítit.



TETRONIC 1304*

www.optifree.cz

**ČISTÍ, DEZINFIKUJE A ODSTRAŇUJE
BÍLKOVINNÁ DEPOZITA Z VAŠICH ČOČEK
S OPTI-FREE® EXPRESS®**

- * Opláchněte důkladně každou stranu čočky
roztokem OPTI-FREE® EXPRESS®.
- * Naplňte ALCON® pouzdro na čočky dostatečným
množstvím čerstvého roztoku OPTI-FREE® EXPRESS®.
Umístěte čočky do pouzdra a pevně jej uzavřete.
Nechte čočky v uzavřeném pouzdře přes noc,
nejméně však 6 hodin. Před nasazením opět důkladně
opláchněte každou stranu čočky tímto roztokem,
abyste odstranili veškeré usazeniny.
- * Před nasazením Vašich čoček pečlivě opláchněte
každou stranu čočky.

Čočky můžete uchovávat v uzavřeném pouzdře
po dobu 30 dní. Pokud je nepoužíváte delší dobu,
musíte je každých 30 dnů a před nasazením
znovu očistit a dezinfikovat.

Čočky
vlhčí
a svěží

**OPTI-FREE®
Express**